

爱尔创·魅影

全 | 锆 | 义 | 齿



魅影·美学型

颜色精准 高效美学


Reliable Materials Expert

 爱尔创



## 魅影-美学型

颜色精准 高效美学

- 预染色, 透性强度兼顾
- 透性自然渐变, 操作简单, 稳定高效
- 美学效果更接近自然牙, 前牙优选

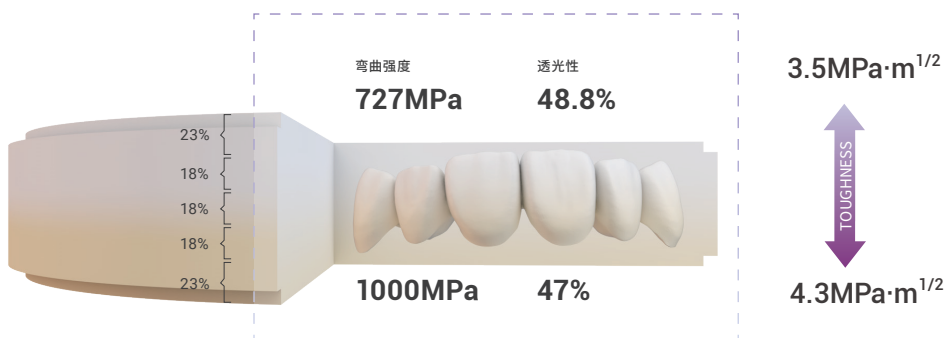

## 产品规格

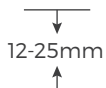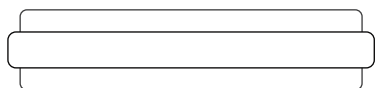

D98X12 D98X14 D98X16 D98X18  
D98X20 D98X22 D98X25

A1 A2 A3 A3.5 A4  
B1 B2 B3 B4  
C1 C2 C3 C4  
D2 D3 D4  
BL1 BL2 BL3 BL4

## 上釉推荐-写实派釉膏

- 色彩丰富、均匀
- 颗粒细腻、操作简单
- 低温烧制、应用广泛
- 自主研发，工艺稳定



### 基础色



### 切端色



### 窝沟色



### 调整色



### 牙龈色




### 透明色





## 排版推荐

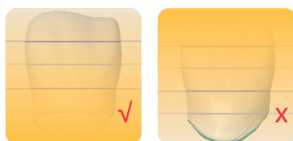根据修复体高度选择合适瓷块高度



## 打磨工具推荐

高效的打磨切削力 / 产热少 / 防崩边

-  超细颗粒
-  8000-15000rpm  
max:25000rpm
-  1pc



编码	UPTF 10	UPTF 02	UPTF 03
尺寸: $\phi$ mm	13	5	4.5
长度: mm	2.0	13.0	13

操作简单 / 高度抛光 / 过程无不良气味

-  中度
-  7000-15000rpm  
max:20000rpm
-  1pc



编码	UPHG 07M	UPHG 06M	UPHG 03M	UPHG 10M
尺寸: mm	26*2	20*1	4*13	12*2


-  中度
-  7000-15000rpm  
max:20000rpm
-  1pc



编码	UPHG 07F	UPHG 06F	UPHG 03F	UPHG 10F
尺寸: mm	26*2	20*1	4*13	12*2

## 烧结曲线

魅影美学型理想烧结温度是1480°C，保温2小时。

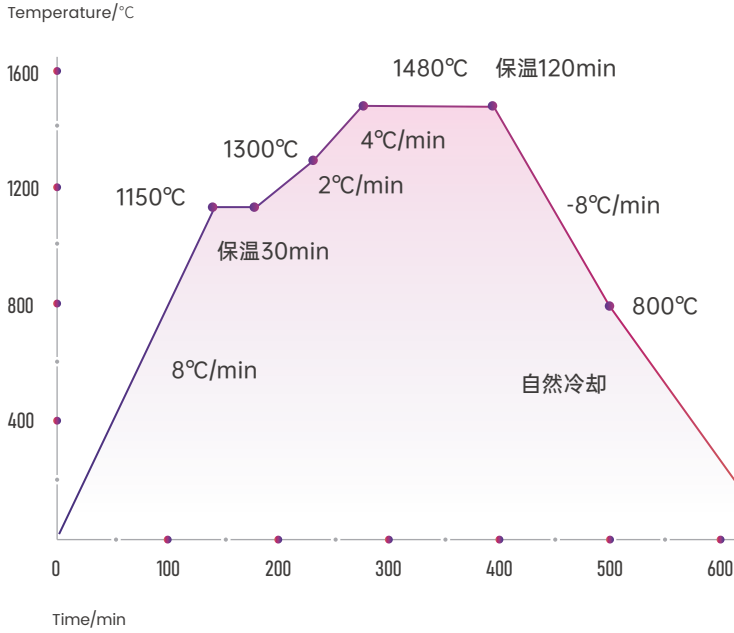

程序	温度 (°C)	升温速率 (°C/min)	保温时间 (min)
第1段	1150	8	30
第2段	1300	2	0
第3段	1480	4	120
第4段	800	-8	0

程序	开始温度 (°C)	结束温度 (°C)	时间 (min)
第1段	室温	1150	141
第2段	1150	1150	30
第3段	1150	1300	75
第4段	1300	1480	45
第5段	1480	1480	120
第6段	1480	800	85
第7段	800	100	自然冷却

备注：烧结温度为炉内烧结牙冠位置实际温度，烧结时可根据烧结炉实际情况和烧结颗数调整程序、烧结温度，详情咨询我司技术支持人员。

国瓷材料 股票代码: 300285



深圳爱尔创口腔技术有限公司

Shenzhen Upcera Dental Technology Co., Ltd.

E-mail: services@upcera.com

网址: www.upcera.com

Copyright©Upcera No.2026 Rev.02

资料仅供专业人士及内部交流使用 \*禁忌内容或注意事项详见产品说明书



官方公众号